


Akustisk putealarm, brukerveiledning

AGRIPPA




Hurtigveiledning


1. Løft av putevibratoren, og åpne batterilokket

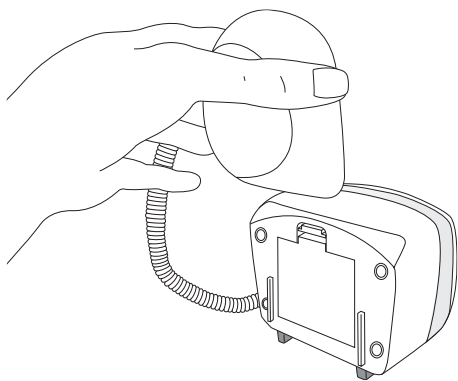

2. Sett inn batteriene med riktig polaritet. Dette er merket på innsiden av batterirommet.

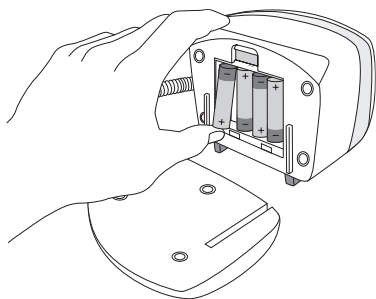


3. Sett tilbake batterilokket.

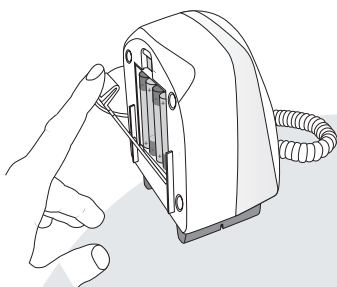


Bruk av enheten

1. Plasser putevibratoren under puten du skal bruke mens du sover.

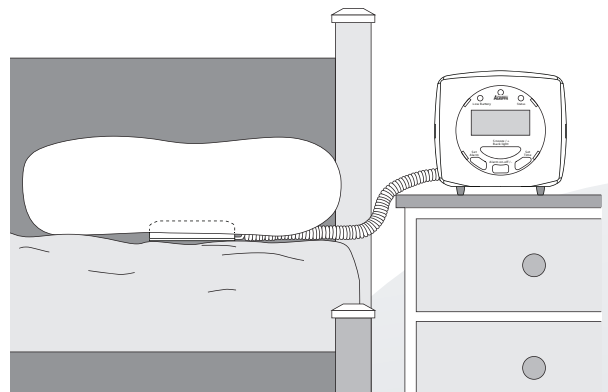

2. Ved utløst brannalarm vil putevibratoren vibrere, og enheten vil blinke. Teksten «FIRE» vil vises i displayet.

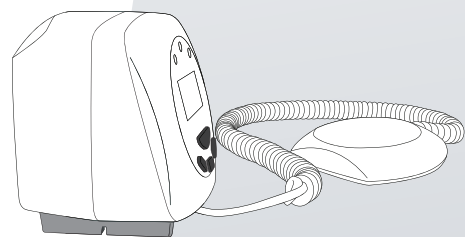

Hvis alarm utløses


Hvis enheten går i brannalarm modus uten at brannalarmen er utløst vil alarmen stoppes ved å trykke «Alarm on-off» Hvis enheten på nytt registrerer en lyd som oppfattes som brannalarm vil den igjen utløses.

Etter bruk


Det anbefales at batteriene fjernes når enheten skal lagres etter bruk.

Justere klokken

1. Trykk og hold «Set Time» knappen.

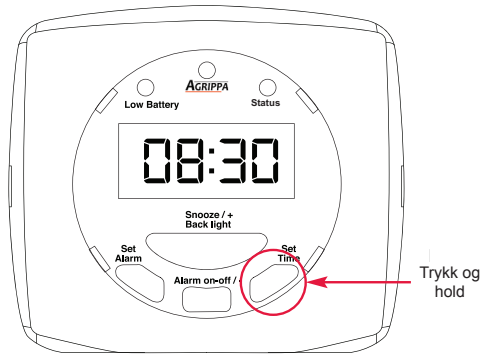


2. Trykk «opp» eller «ned» for å endre tiden.



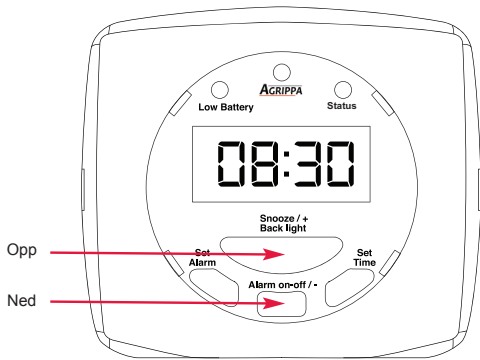


Daglig alarm

1. Trykk og hold «Set Alarm» knappen og bruk «Opp» eller «Ned» knappen for å sette ønsket alarmtid.

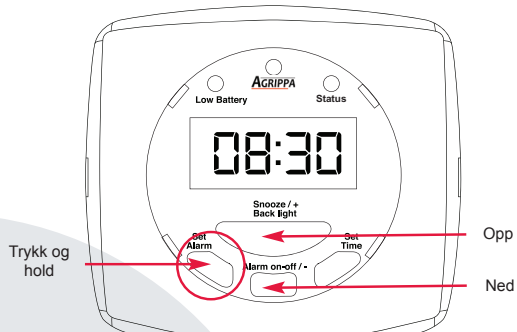

2. For å slå av eller på alarmfunksjonene, trykk «Alarm on-off».

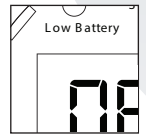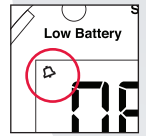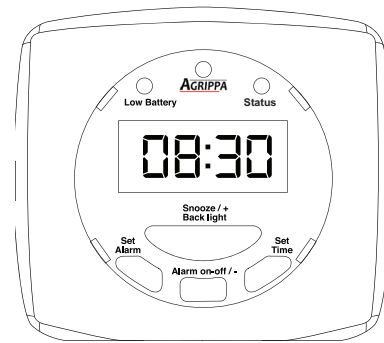

3. Når alarm starter, vil putevibratoren vibrere. Hvis knappen «Snooze» benyttes vil alarmen utsettes i fem minutter.



Display

Brann: Når enheten går i varslingsmodus, vil FIRE vises i displayet og enheten vil blinke. Putevibratoren vil aktiveres og vibrere i et kontinuerlig mønster.

Alarm: Når tidsinnstilt alarm starter vil displayets bakgrunnsbelysning blinke samtidig som at tiden vises. Putevibratoren vil vibrere i en pulserende sekvens.

Status LED: Hvis status LED lyser, lytter enheten til en høy lyd. Hvis den blinker hvert 13. sekund er den akustiske funksjonen frakoblet (Se: frakobling av enhetsfunksjon).

Low battery LED: Hvis «Low battery» lyser, er batteriene svake og må byttes.

Klokke symbol: Et klokkesymbol i øvre venstre hjørne av displayet viser at alarmen er aktiv.